

Genel Tanımlar


Bu ürün OSRON Yara Yıkama cihaz içi bataryalı ve atılabilir, tek kullanımlık cihazdır. Ortopedik cerrahi işlemleri, travma ve genel yara bakım amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kutu içeriği:

- 1 Ana cihaz
- 1 Küçük Konik Uç (ST01 Z)
- 1 Fırçalı Koaksiyal Kanal Ucu (BT04 Z)
- 1 Düz koaksiyal kanal ucu (femur/humerus) CT04Z
- Temizleme aparatı HA 250

Özellikler:

- DC 10.5V / AA x 7 Alkalın Batarya.
- Hortum Uzunluğu 3 metre.
- Yüksek hız debisi 1000 ml/dak'a kadar
- Düşük hız debisi 700 ml/dak
- Basınç 15 PSI 'a kadar

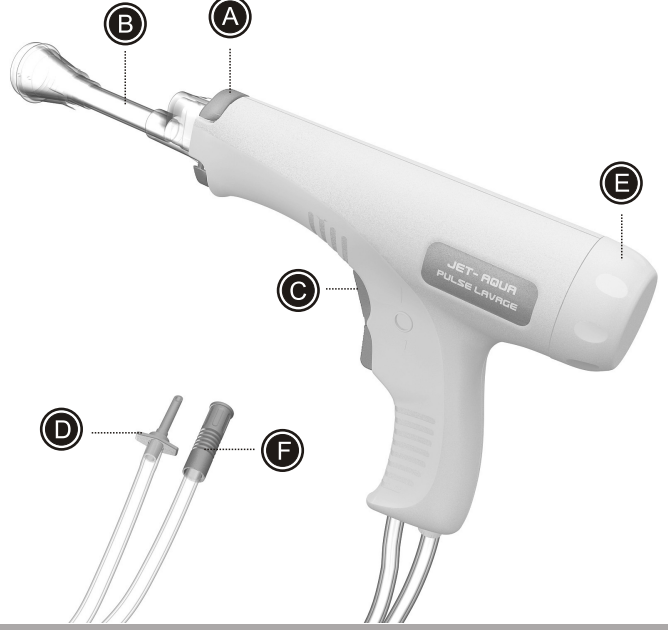

Kullanım Talimatı

1. Paketi aşağıda belirtilen şekilde açın:
 - a. Taşıyıcı hemşire, KESİNLİKLE iç pakete dokunmaksızın dikkatle dış paketin ağzını, steril hemşire kolaylıkla muhtevayı alabilecek şekilde, tam olarak açar.
 - b. Steril hemşire, dış pakete dokunmaksızın iç paketi alır ve steril ortamda tüm aparatları çıkarır.
2. (A)'ya basarak Kilitleme Halkasını geri çekin.
3. Ana cihazın ucuna gerekli ucu takın (B) ve bağlantı güvenli olana kadar itin (Intra Meduller uç kullanırken beyaz kapağın kullanımdan önce çıkarılmasına dikkat edilmelidir).
4. Kullanmak istediğiniz ucu kitleme halkasına basarak yerine kitleyiniz. Çıratmak için de yine aynı halkayı geri çekiniz (A).
5. İrigasyon hortumunu irigasyon kaynağına bağlayınız (D).
6. Emme hortumunu emme kaynağına bağlayınız (F).
7. Emniyet kilidini tetikten ayırınız (C)

Yüksek debi yıkama için tetiğin üst kısmına basınız.
Düşük debi yıkama için tetiğin alt kısmına basınız.
Yıkama suyu gelmemesi için tetiği orta konumda tutunuz.

NOTE:
İlk kullanımda cihazı tetiğe yüksek debi pozisyonunda üst kısmına basarak çalıştırınız.
8. Cihazda irigasyon sıvısının sızması halinde kullanılmak üzere, irigasyon hortumu üzerinde bir klemp bulunmaktadır.
9. Cihazda emme hortumu üzerinde ayarlanabilir klemp bulunmaktadır.

Bataryanın Çıkartılması

Batarya kapağı çıkarılmak için çevrilerek açılır, cihazla bağlantısı kesilinceye kadar batarya çekilerek çıkartılır.



Dikkat

Hekim tarafından veya hekim nezaretinde kullanılmalıdır.

Uyarılar

- Paket açılmadıkça veya hasar görmedikçe sterildir.
- Serin ve kuru ortamda saklayınız.
- Tek kullanımlıktır. Tekrar sterilize edilemez!

İthalatçı:

SAVE Grup Medikal
Elektronik Tic.Ltd.Şti.

1314 Cad. No:14/6 Aşağıöveçler,
06450, Çankaya, Ankara, TÜRKİYE
T: 0 (312) 212 60 51 F: 0 (312) 212 60 81



STERILE EO
re-sterilize edilemez

NOTE

Bataryayı ateşe atmayınız
Tekrar şarj etmeyiniz.

